

MASCARILLAS HIGIÉNICAS PARA ADULTOS FABRICADAS CON MATERIAL TNT

OBJETO

Nuestras mascarillas higiénicas:

Cubren nariz, boca y barbilla; Están fabricadas en un material filtrante adecuado, confeccionadas con material TNT que permite la respiración.

Utilizamos materiales biocompatibles e inocuos y sobre todo limpios, que en contacto con la piel del usuario no presenten riesgos conocidos de irritación o efectos adversos para la salud;

Garantizamos un ajuste adecuado a la cara mediante una banda elástica para las orejas.

Nuestras mascarillas no están homologadas para uso quirúrgico y hospitalario.

MATERIALES

CAPA EXTERIOR 2 capas 100% Polipropileno hidrófobo

CAPA MEDIA 2 capas 80% Poliéster 20% Viscosa

CAPA INTERIOR 1 capa 100% Polipropileno hidrófobo

Usamos las mejores materias primas del mercado para confección, el Textil No Tejido tiene las características propias de los no tejidos, impermeabilidad, elasticidad, suavidad, resistencia al fuego, lavable, esterilizable, amortiguación, barrera contra bacterias.

INFORME DE ENSAYO

Ensayo Test		Resultados Results (Promedio ± DS) (Average ± SD)
5.2.2.	Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) <i>Bacterial Filtration Efficiency (BFE) (%)</i>	96,16 ± 1,62
5.2.3.	Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm ²) <i>Breathability: Differential pressure (Pa/cm²)</i>	29 ± 1
5.2.4.	Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) <i>Splash resistance pressure (kPa)</i>	Fallan 0 de 15 a 17 kPa <i>Failure 0 of 15 at 17 kPa</i>

aitex[®]
textile research institute

2020TM0794



Nos adaptamos a la normativa actual de fabricación, estando certificados por Aitex, informe de ensayo 2020TM0794, ensayos basados en la norma EN 14683:2019+ AC : 2019./

MANTENIMIENTO



Castilla Textil, siguiendo indicaciones de Aitex recomienda un máximo de cinco lavados, siguiendo las siguientes instrucciones: Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Después lavar a mano con agua y jabón, o a máquina a 30 grados y programa delicado.


Dejar secar, se recomienda que las mascarilla se seque completamente en las dos horas posteriores, durante el secado y el almacenaje posterior, se debe evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS PARA ADULTOS FABRICADAS CON MATERIAL TNT

INSTRUCCIONES DE USO



Lavarse la manos,
con agua y jabón
o hidroalcohol.

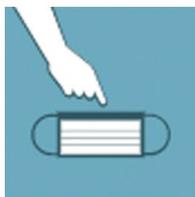


Parte superior de
la mascarilla, para
colocar sobre la
nariz, Twist Band.



Colocar sobre el
rostro sin tocar
la parte frontal
de la mascarilla.



Asegurar a las
orejas con las
bandas elásticas.

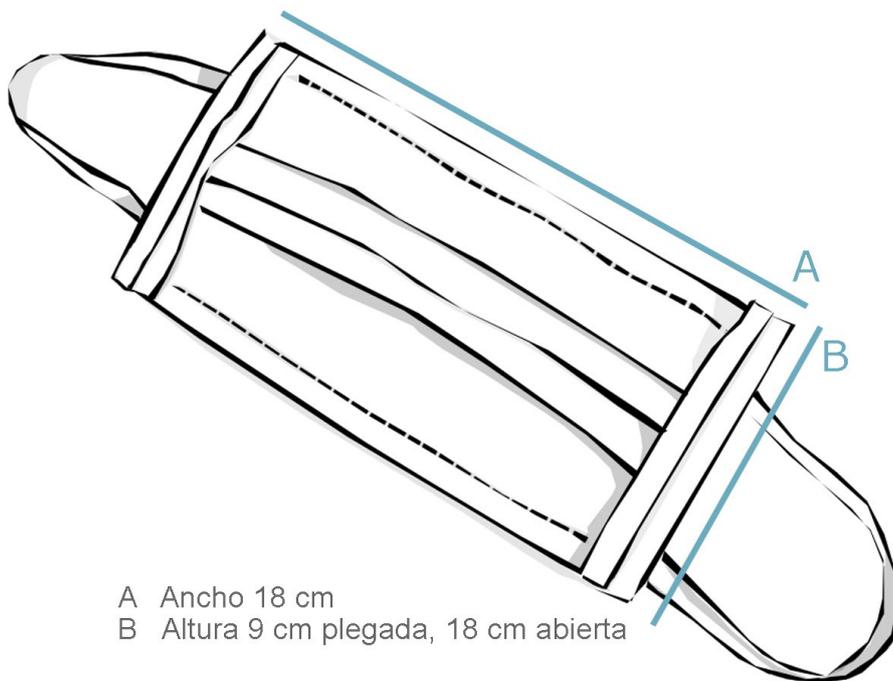

A Ancho 18 cm
B Altura 9 cm plegada, 18 cm abierta

Talla recomendada para uso en adultos.

Dimensiones 18 cm x 18 cm (abierta) Material TNT.

Sujeción a las orejas mediante una banda elástica en cada extremo.

**Las mascarillas van empaquetadas individualmente,
se entregan en paquetes de 50 unidades, correctamente etiquetadas,
y en cajas de 1000 unidades.**