

# FICHA TÉCNICA

<b>Referencia y denominación</b>	MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE NºINFORME 20-008899 LABORATORIOS AMSLAB				
<b>Modelo</b>	PT 50 SESDERMA				
<b>Tipo</b>	Mascarilla higiénica reutilizable				
<b>Tallas</b>	Disponible en 3 tallas S / M / L				
<b>Fabricado para</b>	SUINCE S.L.				
<b>Importador</b>					
<b>Clasificación</b>	Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 CEE o del Reglamento (UE) 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425"				
<b>Ensayos</b>	Mascarilla ensayada bajo la norma <b>UNE 0065:2020</b> Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales				
<b>Ámbito de aplicación</b>	La mascarilla higiénica está destinada a adultos y niños sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, según las medidas establecidas en el documento técnico "Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19" publicado por el Ministerio de Sanidad <a href="https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf">[https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf.]</a>				
<b>Nº máximo de lavados</b>	25 Lavados				
<b>Descripción</b>	Mascarilla de 3 capas, 2 soldadas por calor y una tercera cosida. Sujeción por medio de 2 gomas en las orejas. No tiene puente nasal				
<b>Materiales</b>	<b>Capa externa:</b>	Tejido interlock de poliéster (125 g/m2) sublimado + tejido interlining termofusible (53g/m2)			
	<b>Capa interna:</b>	TEC 7191 (80% poliéster 20% poliamina))			
	<b>Correa elástica:</b>	70% poliéster 30% elasteno			
<b>Eficacia de filtración % (Ensayo BFE, según apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)</b>	Antes del lavado: 92% Después de 25 lavados: 90%				
<b>Respirabilidad (presión diferencial en Pa/cm<sup>2</sup> según (apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)</b>	Antes del lavado: 27pa/cm2 Después de 25 lavados: 30pa/cm2				
<b>Método de limpieza validado según ensayo</b>	Lavado y desinfección de las mascarillas con detergente común y agua, temperatura máxima 60º. Ciclo normal de lavadora. No usar secadora.				
<b>Especificaciones de embalaje</b>	<b>Embalaje</b>	<b>Unidades</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Peso Bruto</b>	<b>EAN</b>
	Bolsa plástico	25	250x280 mm	0.500 kg	
	Caja cartón logística	1.000	400x600x400 mm	20 kg	

<b>Transporte y almacenaje</b>	Almacenar en ambiente seco y no exponer directamente a la luz del sol		
	Temperatura: -20°C / +55°C	Humedad relativa: < 93%	
	Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa		
<b>Periodo de validez</b>	2 años (si aplica)	<b>CÓDIGO EAN:</b>	Talla S 8420513615089 Talla M 8420513615072 Talla L 8420513615065